

## I. Décharge avant pied Plaies plantaires

MODELES	POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS
<p><b><u>Podapro ,Podomed Barouk prolongée</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile à mettre</li> <li>- Décharge correcte si bien utilisée</li> <li>- Protection de l'avant pied pour la Podapro et Barouk prolongée</li> <li>Légère pour la Podomed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur +/-</li> <li>- Bascule en avant</li> <li>- Observance faible</li> <li>- Peu de réduction de l'activité</li> </ul>
<p><b><u>WPS</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moins haute</li> <li>- Moins de bascule</li> <li>- Légère</li> <li>- Simple à mettre</li> <li>- Gros volume de pansement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risque de pied en varus (en cours de modifications)</li> <li>- Mauvaise tenue de la cheville</li> <li>- Observance limitée</li> <li>- Usure prématurée</li> </ul>
<p><b><u>Podalux et Podalight</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Structure en forme de « tampon de buvard »</li> <li>- Stabilité</li> <li>- Semelle à rigidité modulable</li> <li>- Simple à mettre</li> <li>- Gros volume de pansement</li> <li>- Chaussette orteils amovible</li> <li>- Remboursement total pour la Podalux</li> <li>- Légère pour la Podalight</li> <li>- Podalight : pointure jusqu'au 47</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attention aux bords rigides</li> </ul>

## II. Décharge talon

MODELES	POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS
<p><b><u>Teraheel</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile à mettre</li> <li>- Stabilité</li> <li>- Bonne position du pied</li> <li>- Bonne hauteur</li> <li>- Protection arrière</li> <li>- Réglage à l'arrière par bande agrippante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- semelle rigide sur la partie postérieure</li> </ul>
<p><b><u>PODOMED Talon</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile à mettre</li> <li>- Capitonnage sans couture</li> <li>- Grande ouverture de chaussage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionne le pied en équin</li> </ul>
<p><b><u>Sanital</u></b> <b><u>deux modèles: toile de jeans et thermo formable</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon maintien de la cheville</li> <li>- Modulable (thermo formable)</li> <li>- Bien tolérée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Souvent mal réglée</li> <li>- Compliquée à mettre</li> <li>- Modèle jeans trop souple</li> <li>- Positionne le pied en équin</li> </ul>

## III. Autre matériel de décharge

### Toute zone de décharge

MODELES	POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS
<p><b><u>Botte NEXTEP SHORTIE</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne décharge</li> <li>- Cheville fixée</li> <li>- Diminution du temps d'appui</li> <li>- Ajustement de la pression (pompe)</li> <li>- Stabilité</li> <li>- Prix (LPPR*)</li> <li>- Observance bonne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume</li> <li>- Mise en place difficile</li> </ul>
<p><b><u>Teradiab</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facile à mettre</li> <li>- Bonne position du pied</li> <li>- Gros volume de pansement</li> <li>- Livrée avec semelles talus, possibilité de mettre une semelle modus à l'intérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semelle Modus non remboursée</li> </ul>
<p><b><u>DTACP</u></b> <b><u>Dispositif Transitoire d'Aide à la Cicatrisation des Plaies</u></b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Décharge permanente mais partielle</li> <li>- Décharge sur mesure</li> <li>- En particulier médio pied</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coût</li> <li>- Peu de réduction de l'activité</li> <li>- Délai de réalisation</li> <li>- <b>Prescription médicale obligatoire</b> (mêmes conditions que chaussures orthopédiques)</li> </ul>



# CHAUSSURES ET APPAREILLAGE DE DECHARGE DU PIED

01/06/2017

Ce tableau est le fruit d'un travail de synthèse de l'équipe du service de Diabétologie du pôle de référence CHU de Toulouse. A noter que cette analyse n'est pas exhaustive de tous les dispositifs actuellement sur le marché, seuls les appareillages utilisés couramment par notre équipe sont présentés. Ce document est régulièrement actualisé, il est cependant possible que certaines informations nous aient échappé. Le cas échéant, nous vous remercions de nous les signaler.

Propriété intellectuelle : les documents ci-dessus sont d'utilisation libre, la source de production Réseau DIAMIP doit être signifiée.