



## Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le  
25/08/2016

Laboratoire	Stylo choisi	Graduation Nb d'unité maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm) Gauge
<b>LILLY</b> <b>N° Vert : 0800003636</b>	<b>HumaPen SAVVIO</b>  <b>HumaPen LUXURA HD</b>	1 en 1 jusqu'à 60 unités  ½ en ½ jusqu'à 30 unités	<b>Cartouche 3ml Lilly</b>  Umuline NPH Rapide Profil 30  Humalog Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 Abasaglar	Disponibilité en 6 couleurs du SAVVIO Facilité d'emploi, élégant et discret Grande souplesse de son piston Bonne visibilité de la dose dans la fenêtre de lecture	<b>BD Microfine+</b> 12,7 x 0,33 (29 G) <b>BD Microfine Ultra (Pentapoint)</b> 4 x 0,23 5 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G)  <b>NOVOTwist</b> (adaptable Novo uniquement) 5 x 0,23 (32 G) 8 x 0,30 (30 G)  <b>NOVOfine</b> 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,30 (30 G)  <b>Omnican</b> Mini 8 x 0,30 (30 G) Fine 12 x 0,33 (29 G)  <b>Unifine et</b> <b>Unifine plus(avec désadaptateur)</b> 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Penfines "Click"</b> 4,5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 10 x 0,33 (29 G) 12 x 0,33 (29 G)  <b>Insupen</b> 4 x 0,23 (32 G) 6 x 0,23 (32 G) 8 x 0,23 (32 G) 5 x 0,25 (31 G) 6 x 0,25 (31 G) 8 x 0,25 (31 G) 12 x 0,33 (29 G)
	<b>NOVOPEN 4</b>	1 en 1 jusqu'à 60 unités	<b>Cartouche 3 ml (Novo Penfill)</b> LEVEMIR Insulatard Actrapid NovoRapid NovoMix 30	Clic de sélection de la dose d'insuline audible Clic audible en fin d'injection Grande fenêtre de lecture de la dose (loupe) Retour en arrière simplifié en cas d'erreur de sélection de la dose	
<b>NOVOPEN Echo</b>	1/2 en 1/2 jusqu'à 30 unités	Affichage digital de la dose (durée de vie des piles 4 à 5 ans) Fonction mémoire de la dernière dose.			



## Stylos à insuline rechargeables

Tableau mis à jour le  
25/08/2016

Laboratoire	Stylo choisi	Graduation Nb d'unité maximum	Insulines compatibles	L'avis des soignants	Aiguilles adaptables L x Ø (mm) Gauge
<b>SANOFI AVENTIS</b> N° Vert : 0800 10 52 53	<b>ClikSTAR</b>	1 en 1 jusqu'à 80 unités	<b>Cartouche ClikSTAR</b> 3 ml LANTUS 3ml APIDRA	Ne pas mélanger la Lantus à une autre insuline – risque de précipitation  Bouton d'injection souple Possibilité de différencier les insulines de manière tactile par toucher du piston (utile pour malvoyant).	<b>BD Microfine+</b> <b>BD Microfine Ultra</b> <b>Ypsomed Penfine Click</b> <b>Unifine et Unifine plus</b> <b>Insupen</b>
	<b>JuniorSTAR</b>	1/2 en 1/2 jusqu'à 30 unités			